

3M™ Cavilon™



# Účinná ochrana pokožky v každém věku



Nedráždivý bariérový film  
Ochranný bariérový krém

**3M**

# 3M™ Cavilon™

## Nedráždivý bariérový film



Film chrání pokožku před macerací a drážděním v důsledku přítomnosti moči, stolice, exsudátu z rány, adhezivních materiálů a třecích sil.

- Nedráždí tkáň a nepůsobí bolest
- Není cytotoxický
- Neobsahuje alkohol
- Bezbarvý, transparentní
- Propustný pro kyslík a vodní páry
- Na jednu aplikaci účinkuje až 72 hod.
- Hypoalergenní




Chrání porušenou kůži při inkontinenci.



Ošetření okolí I.V. vstupů.



Ošetření ran

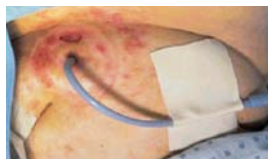

Ošetření okolí drenáží, stomií a ran.



Chrání pokožku před adhezivou.



Léčba již poškozené kůže a prevence macerace

## Indikace a aplikace

Bariérový film 3M Cavilon působí jako ochranná bariéra mezi kůží a dráždivými tělesnými tekutinami. Doporučujeme používat jako preventivní ošetření v okolí tracheostomií a drénů, na okolí secernujících ran, i.v. katetrů (pouze ve sterilní verzi) a při riziku poškození kůže adhezivními materiály. Jeho účelem je působit jako bariéra proti chemickému a částečně i mechanickému dráždění.

Nanáší se na čistou suchou kůži. Aplikaci je třeba opakovat po 48-78 hodinách (v běžných podmínkách). Nepoužívejte na infikované oblasti (př. mykózy) nebo jako náhradu sterilního krytí.

# 3M™ Cavilon™

## Ochranný bariérový krém




Krém chrání nenarušenou nebo jen podrážděnou (zarudlou) pokožku před působením stolice, moči a jiných tekutin. Pokožku hydratuje a pomáhá ji zachovat jemnou a vláčnou.

- Prodyšný, voděodolný
- Trvanlivý, se zvýšenou odolností proti smytí
- Stačí nepatrné množství pro dostatečnou ochranu
- Vhodné pro inkontinentní a plenované pacienty
- Díky hypoalergennímu složení též vhodný pro ošetření pokožky kojenců a malých dětí



### Jak funguje ochranný krém 3M™ Cavilon™?

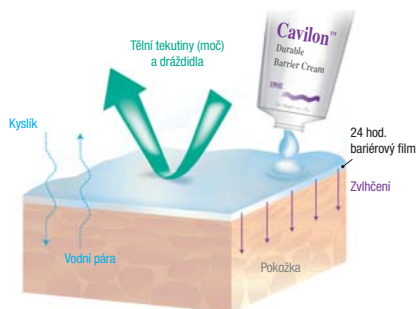

Nesnižuje absorpční funkci plen a podložek (rychle a dokonale se vsřebává do pokožky, nestírá se na lůžkoviny nebo savé plochy)

Neomezuje adhezivní funkci – lepení (nedochází ke znehodnocení dalších materiálů)



### Indikace a aplikace

Vhodné pro inkontinentní a plenované pacienty.

Aplikujte denně nebo po každém 3.-4. mytí.

# 3M™ Cavilon™



## Jak poznám, který Cavilon použít pro své pacienty?

- **Použijte Cavilon nedráždivý bariérový film**
  - na ochranu a léčbu podrážděné nebo poškozené pokožky
  - okolo ran jako dlouhodobou ochranu.
- **Použijte Cavilon ochranný bariérový krém**
  - na nepoškozenou pokožku jako prevenci před dráždivými tělními tekutinami. Primární použití pro inkontinentní pacienty (děti i geriatrické pacienty)

## Jak mohu objednat Cavilon?

Cavilon můžete objednat pod uvedenými katalogovými čísly v následujícím provedení a balení.

### 3M™ Cavilon™ No Sting Barrier Film - Nedráždivý bariérový film

kat. číslo	popis	ks/balení	VZP
3343E	tampón 1 ml	25	-
3343P	tampón 1 ml	5	81422
3345E	tampón 3 ml	25	-
3345P	tampón 3 ml	5	80864
3346E	spray 28 ml	12	-
3346P	spray 28 ml	1	80863

### 3M™ Cavilon™ Durable Barrier Cream - Ochranný bariérový krém

kat. číslo	popis	ks/balení	VZP
3391E	tuba 28 g	1	-
3392E	tuba 92 g	1	-
3392S	sáček 2 g	20	-

## Kde mohu Cavilon zakoupit?

Cavilon zakoupíte v lékárnách a prodejnách zdravotnických potřeb prostřednictvím naší distribuční sítě:

Mediset Chironax s.r.o.  
Boženy Němcové 54  
370 01 České Budějovice  
Tel.: 387 311 874  
[www.mediset.cz](http://www.mediset.cz)



3M Česko, spol. s r. o.  
V Parku 2343/24  
148 00 Praha 4  
Tel.: 261 380 111  
Fax: 261 380 110  
[www.3M.cz/Cavilon](http://www.3M.cz/Cavilon)

3M a Cavilon jsou ochranné známky společnosti 3M.